

Protectaplast®



La plus *parrrrfaite* des protections

Pet Protection



Auto-adhésif

Bandages légers pour animaux

Ne colle pas à la peau, poils, blessure





Pet Protection

Au secours, mon animal est blessé !

Nous considérons tous comme acquis le fait d'avoir un minimum de matériel de premiers secours à la maison pour nous-mêmes et/ou nos enfants (spray désinfectant, pommade, pansements, ...).

Mais que faites-vous si votre animal a une blessure ?



Un accident est toujours possible, même avec un animal (domestique).

Les plaies de votre chat, chien, lapin, cheval, etc. peuvent survenir de différentes manières. L'animal peut s'être blessé accidentellement, ou il vient de subir une intervention chez le vétérinaire.

Le soin d'une telle plaie est souvent plus difficile que chez les humains.

Les soins

La première étape du traitement d'une plaie consiste à la **nettoyer**. Vous pouvez le faire en **rinçant abondamment la plaie à l'eau**. L'eau n'est pas nocive pour la plaie. Pendant le rinçage, exercez une légère pression sur la peau autour de la plaie afin de chasser toute saleté plus profonde de la plaie. Vous pouvez retirer la fourrure autour pour éviter que des poils ne se coincent dans la plaie.

En cas de plaies importantes et profondes, consultez toujours votre vétérinaire !

Pour les plaies simples et superficielles, vous pouvez appliquer une pommade (pommade au miel, pommade pour plaies ou pommade antibiotique - *sans isobétadine, ni de pommade noir*) afin que la plaie ne s'enflamme pas.

Pour éviter que votre animal ne morde la plaie elle-même ou que des saletés n'y pénètrent, il est préférable de couvrir la plaie. **Coller un pansement est presque impossible...** Alors que faire maintenant ?





Pet Protection

Protectaplast Pet Protection est notre réponse à votre question !

Notre gamme de pansements **auto-adhésifs** est très efficace et particulièrement adaptée au soin et à la protection des plaies des animaux ! La gamme complète est conçue pour être utilisée aussi facilement et efficacement que possible.

Les bandages sont tous **fabriqués sans colle**, et sont auto-adhésifs. Nous entendons par là qu'ils ne s'attachent qu'à eux-mêmes, et à rien d'autre ! Cela permet d'éviter que **le bandage ne se colle à la plaie ou aux poils** de votre animal. De plus, nos bandages sont très légers, de sorte que votre animal ne sentira presque pas le bandage.



Notre gamme:

La gamme est composée de :

- 3 tailles de pansements auto-adhésifs
- 1 assortiment de 3 tailles de pansements auto-adhésifs
- 2 tailles de pansement auto-adhésif avec compresse intégrée
- 2 tailles pansements auto-adhésifs en mousse bleue
- 2 tailles pansements auto-adhésifs en mousse beige





Pet Protection

Pansements en mousse



REF. 5500PP - Foam Blue 6cm x 4,5m

REF. 5501PP - Foam Blue 3cm x 4,5m



REF. 5510PP - Foam Beige 6cm x 4,5m

REF. 5511PP - Foam Beige 3cm x 4,5m



Prévenir vaut toujours mieux que guérir

Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours.

Ainsi, si votre animal est blessé, il est très important d'avoir à disposition le bon matériel de premiers secours

Pet Protection pansements en mousse sont des éléments indispensable de votre trousse de premiers soins !

Après avoir nettoyé la plaie et appliqué une pommade, vous pouvez appliquer ce pansement mousse directement sur la plaie.

Appliquez toujours un bandage en 3 couches. La première couche est appliquée sur la plaie et la deuxième couche stabilise la première couche et absorbe l'excès d'humidité de la couche 1. Puis la troisième couche apporte la touche finale et une protection supplémentaire.

Grâce à la fonction auto-adhésive de nos bandages, vous n'avez pas à vous soucier de ruban adhésif ou de fixation supplémentaire.





Pet Protection

Bandes cohésives

REF. 90863PP - Bandes cohésives 3pcs - 2,5cm x 4,5m

REF. 9085PP - Bandes cohésives 1pce - 5cm x 4,5m

REF. 9087PP - Bandes cohésives 1pce - 7,5cm x 4,5m

REF. 90855PP - Assortiment 7pcs

- 1 pce 7cm x 4,5m
- 3 pcs 5cm x 4,5m
- 3 pcs 2,5cm x 4,5m



Pet protection bandes cohésives

Un pansement robuste qui peut être utilisé à la fois comme pansement compressif et comme sparadrap. Directement sur la plaie ou en renfort après l'application d'une compresse. La règle de **l'application en 3 couches** s'applique également ici.

Tous nos bandages sont

- Auto-adhésif
- Ultra-léger
- Déchirable
- Stretch
- Absorbant
- Laisse respirer
- Hypo-allergénique

**Grâce à leurs tailles pratiques,
tous nos bandages sont parfaits
pour les petits et les grands animaux
(domestiques) !**





Pet Protection

Bandes cohésives avec compresse

REF. 9088PP - Bandes cohésives avec compresse 6cm x 2m

REF. 9089PP - Bandes cohésives avec compresse 8cm x 2m



Pet Protection bandes cohésives avec compresse

Un pansement robuste avec une compresse intégrée. Grâce à la compresse, ce bandage peut être appliqué très facilement directement sur la plaie. La règle de l'application en 3 couches s'applique également ici.

!! Quelques points à prendre en compte lors de l'application d'un bandage :

- Ne pas trop serrer
- Pas trop lâche, sinon le pansement risque de s'affaisser et de ne pas offrir une protection suffisante à la plaie.
- Appliquez toujours le pansement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de bas en haut. Le sang s'écoule vers le bas (de la tête aux jambes) et doit donc être pompé vers le haut.



Protectaplast®



Pet Protection

**La plus
parrrrfaite
des protections**



www.protectaplast.be

sales@protectaplast.be